


Kühlkompressionsbandage für Pferde

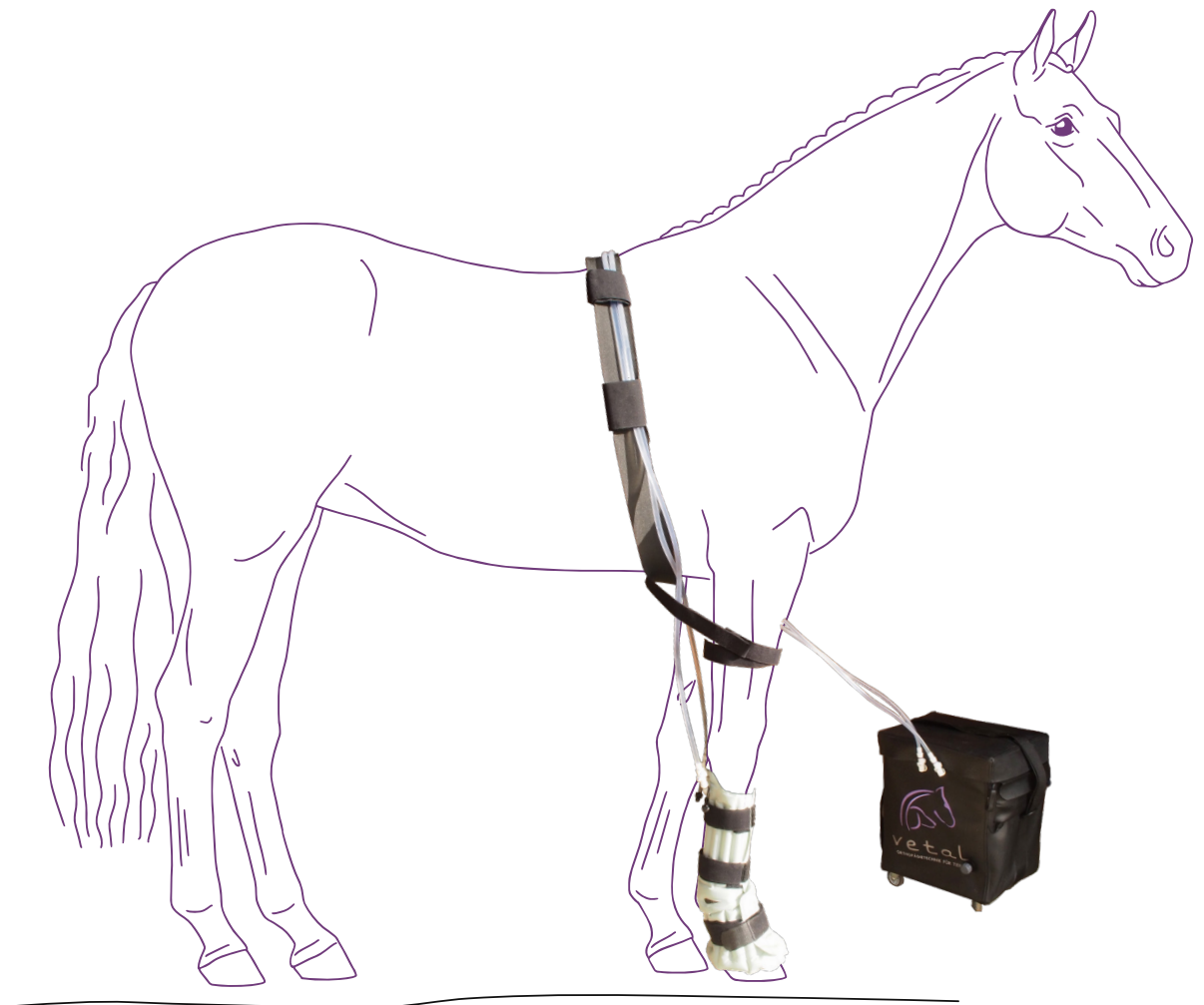

Die Kühlkompressionsbandage von vetal

- ◆ Unsere Therapiebandage verbindet Kältetherapie mit Kompression.
- ◆ Durch die Kompression passt sich die Therapiebandage dem Pferdebein optimal an.
- ◆ Bei Verwendung der E-Kühlbox entsteht durch den dauernden Wasserdurchfluss zusätzlich ein wohltuender Massageeffekt.
- ◆ Auch eine Wärmebehandlung oder der Wechsel zwischen Wärme- und Kälte-Anwendung ist möglich.
- ◆ Die Therapiegamasche kann sowohl trocken als auch nass angewendet werden.
- ◆ Neben dem Röhrlbein werden auch Fesselgelenk, Fessel und Huf gekühlt.
- ◆ Die genaue Anwendung im Einzelfall sollte mit dem behandelnden Tierarzt oder Therapeuten besprochen werden.



Kühlen (griechisch „Kryotherapie“) ist bei Mensch und Tier eine bewährte Soforthilfemaßnahme bei Verletzungen am Bewegungsapparat. Dazu zählen Phlegmone/ Einschuss, Sehnen-, Bänder-, Fesselträgerreizungen und -verletzungen, angelaufene Beine (Inaktivitätsödeme), postoperative oder posttraumatische Ödeme, Prellungen, Entzündungen, Gallen in der Entstehung, akute Arthrose-Schübe, Hufrollenentzündung und Hufrehe. Kälte bremst die Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen, wodurch beginnenden Entzündungsreaktionen sowie der Bildung von Ödemen effektiv und effizient entgegengewirkt wird.

Kompression unterstützt unter anderem den aktiven Abtransport der Lympflüssigkeit und beugt Schwellungen vor.

Durch größere körperliche Belastung bei intensivem Training entstehen oft unbemerkt Mikrotraumen, kleine Entzündungen und Reizungen im beanspruchten Gewebe. Zur schnelleren Regeneration und Gesunderhaltung kann die Anwendung daher prophylaktisch direkt *nach* dem Training oder Wettkampf erfolgen.

Wärme dagegen kann *vor* dem Training und bei Pferden mit Arthritis hilfreich sein. Wärme erhöht die Elastizität des Bindegewebes, erweitert die Blutgefäße und verbessert so den Sauerstoff- und Nährstofftransport bzw. den Abtransport von Stoffwechselabbauprodukten, was wiederum die Heilung von Restentzündungen fördert.

Wärme wird im Regelfall nicht im Anfangsstadium einer Verletzung eingesetzt. Unter bestimmten Umständen kann auch ein Wechsel zwischen Kälte- und Wärmetherapie sinnvoll sein.

Bei Lahmheiten und (chronischen) Erkrankungen sollte natürlich grundsätzlich ein Tierarzt oder Therapeut konsultiert werden, mit dem der Einsatz und die Tragedauer der Therapiebandage, je nach Indikation, abgestimmt werden kann.



Langzeitanwendung in Verbindung mit der E-Kühlbox ermöglicht eine komfortable Langzeittherapie mithilfe der Kühlkompressionsbandage z.B. bei Hufrehe.

Zahlreiche Studien in Australien, USA und Europa belegen die Auswirkung einer Langzeitkühlung von bis zu 72 Stunden bei Hufrehe. Wenn die Kühlung schnell genug nach Einsetzen eines Rehe-Schubs erfolgte, ließ sich dieser im besten Fall innerhalb von weniger als 24 Stunden stoppen. Der Verlauf wurde geringgradiger, weil die Kälte einer Entzündung der Huflederhaut und somit auch einer Senkung des Hufbeins entgegenwirkte, Schmerz wurde gelindert. Die Kühlkompressionsbandage liefert für diesen Einsatzfall eine langanhaltende gleichmäßige Kühlung ohne Gefahr von Erfrierungen



vetal | Orthopädietechnik für Tiere by albrecht GmbH
 Chiemseestraße 81 | 83233 Bernau am Chiemsee | Deutschland
 Tel. +49 8051 96129-0 | Fax +49 8051 96129-30 | info@vet-al.de

www.vet-al.de

Kühlkompressionsbandage

Ausführungen

Wir bieten die **Kühlkompressionsbandage** in zwei **Größen** (M und L) für das *linke* oder *rechte* Pferdebein.

Dazu, als Set erhältlich, ein **Kühlkübel mit Handpumpe** oder alternativ eine **E-Kühlbox mit elektrischer Pumpe** und Powerbank.

Das benötigte Eis, und/oder die gefrorenen Kühlakkus können im isolierten Kühlkübel oder in der Kühlbox bequem vom eigenen Gefrierfach zum Stall transportiert werden, ohne zu schnell zu schmelzen. Vor Ort wird vor der Anwendung möglichst kaltes Wasser zum Eis gegeben.



Der **Kühlkübel mit Handpumpe** eignet sich besonders für den schnellen und häufigen Einsatz zur Regeneration nach dem Training oder Wettkampf und zur kurzzeitigen Kühlung des Pferdebeins bei Schwellungen, Zerrungen, Prellungen und/oder Entzündungen unterhalb des Karpalgelenks. Da die Wasserschläuche nach der Befüllung mit Wasser abgeklickt werden, kann sich das Pferd frei in der Box bewegen. Weitere **Kühlkompressionsgamaschen zur Kühlung mehrerer Beine** können zusätzlich erworben werden.



Die **E-Kühlbox** wird mit einer leistungsstarken Powerbank geliefert. Das Eis-Wasser wird mittels einer Durchlaufpumpe ständig durch die Kühlkompressionsbandage gepumpt, wodurch zusätzlich ein wohltuender Massageeffekt entsteht. Die Anwendung ermöglicht eine längere Kühldauer, wobei nach einer gewissen Zeit ggf. ein Teil des Wassers ausgewechselt bzw. neues Eis nachgefüllt werden muss. Bei dieser Variante muss das Pferd für die Dauer der Anwendung angebunden werden.



Optional bieten wir für die *Langzeitkühlung* mittels E-Kühlbox einen **Deckengurt** mit variablen Befestigungsschlaufen, der die Wasserschläuche sicher am Pferdekörper entlang führt, sowie eine **Isolierung** für die Wasserschläuche und eine **Schutz-/Isoliergamasche** die über der Kühlkompressionsbandage angelegt werden kann.

