


Bauchkompressions- Bandage für Pferde



**Von einer Person
mit wenigen Handgriffen anzulegen –
schnell und sehr flexibel anpassbar**

Die Bauchkompressionsbandage von vetal

Nach einer Kolikoperation muss die Wundnaht optimal geschützt und stabilisiert werden, um Narbendurchbruch, Ödeme und Infektionen zu vermeiden. Ein klassischer Verband ist aber ausgerechnet hier besonders schwierig anzulegen. Die **Bauchkompressionsbandage** von vetal schafft Abhilfe: Sie ist schnell und einfach auch von einer Person anzulegen. Ihre Passform ist sehr flexibel, sie liegt an wie eine zweite Haut, sonst häufig auftretende Probleme beim Urinieren werden verhindert.

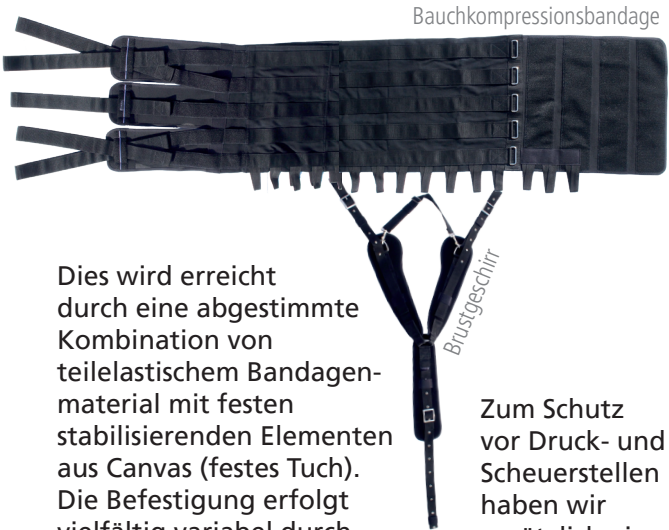

Dies wird erreicht durch eine abgestimmte Kombination von teilelastischem Bandagenmaterial mit festen stabilisierenden Elementen aus Canvas (festes Tuch). Die Befestigung erfolgt vielfältig variabel durch Klettgurte, mit denen die Kompression stufenlos angepasst werden kann.

Das ebenfalls individuell verstellbare **Brustgeschirr** verhindert Verrutschen der Bandage nach hinten, seine elastischen Teile erhalten die Bewegungsfreiheit.

Zum Schutz vor Druck- und Scheuerstellen haben wir zusätzlich eine hochwertige **Schabracke** entwickelt. Sie besteht aus reinem Wollfilz, der optimale Feuchtigkeitsregulierung bietet und Druck sanft verteilt.



stabilisierter
Wundbereich


Das Wundverbandmaterial wird in eine austauschbare und bei 95°C waschbare Baumwolltasche eingelegt. Ist besondere Kompression erforderlich, kann bei entsprechender Indikation eine zusätzliche Kompressionsplatte den Druck punktuell erhöhen.



Erleichterung der täglichen Kontrolle und Versorgung: fixierbare Wundkompressentasche



bei ärztlicher Empfehlung: zusätzliche Kompressionsplatte

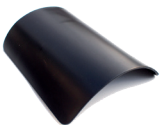

Unsere speziell angefertigte Schabracke ist für den haut- und fellschützenden Dauereinsatz konzipiert. Für besondere Rückenlinien gibt es sie mit freiem Wirbelkanal für besten Komfort.



Bauchkompressionsbandage Maße & Bestellung



.....
Name & Adresse Besteller


.....
Telefon & e-Mail

Maße

.....
Pferdenname/Rasse

.....
Stockmaß ca Alter

.....
Diagnose

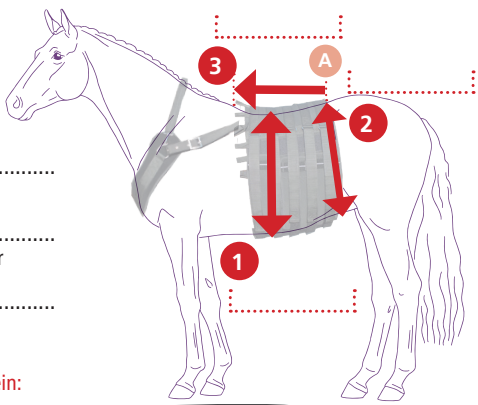

Bitte tragen Sie die **3 Maße** ein:

- 1** messen Sie den **Bauchumfang** an der **breitesten** Stelle
- 2** messen Sie den Umfang an der **schmalsten** Stelle vor der Hinterhand. Der Punkt **A**, wo oben das Maßband am Rücken liegt, ist der Ausgangspunkt für das nächste Maß.
- 3** von dort aus messen Sie die Länge bis zum **Widerrist (=Rückenmaß)**

Bestellung (bitte fragen Sie den aktuellen Preis an)

Menge

..... **Set**
Bauchkompressionsbandage + Brustgeschirr +
Wundkompressentasche

zusätzlich

- Schabracke spezial mit freiem Wirbelkanal
..... Kompressionsplatte
..... Wundkompressentasche (weitere zum Wechseln)

Senden Sie Fragen und Ihre Bestellung an:

vetal | Orthopädietechnik für Tiere by albrecht GmbH
Chiemseestraße 81 | 83233 Bernau am Chiemsee | Deutschland
Tel. +49 8051 96129-0 | Fax +49 8051 96129-30 | info@vet-al.de